

# NORRAID®

## FØRSTEHJELP

Mediq Norge AS  
Dyrskueveien 13,  
2040 Kløfta, Norway

kundeservice@mediqnorge.no  
www.mediqnorge.no  
Patent Pending.

## Blizzard Thermoteppe

- Åpne pakken og ta ut teppet.
- Rull ut og strekk teppet helt ut sideveis, for å åpne luftcellene.
- Legg ut teppet med den perforerte siden opp. Hvis nødvendig legg isolasjon under teppet. Legg den tilskadekomne pasienten i senter av teppet.
- Dra av den langsgående rosa plaststripen som dekker limkanten som går langs kanten av teppet.
- Pakk teppet rundt den tilskadekomne pasienten. Fest limkanten til teppet for å isolere pasienten og for å gjøre teppet tett.
- Dra forsiktig i teppet i lengderetning når den tilskadekomne er pakket inn, for å sørge for at cellene er fulle av luft. Gjenta hvis luftcellene mister fasong.
- Limstripen kan åpnes og lukkes flere ganger ved behov for pasienttilsyn.

### Innpakket størrelse

Lengde: 21cm  
Bredde: 11 cm  
Høyde: 4,5cm  
Vekt: 500 gram

### Åpnet størrelse

Lengde: 2,3m  
Bredde: 2,0m  
Brukstemperatur:  
-40°C til +40°C

Produsent: Blizzard Protection Systems Ltd., Wales, UK.  
Distributør: Mediq Norge AS – [www.noraid.no](http://www.noraid.no)

**RIV HER**

**FOR ÅPNE**

